

TR 1000 / TR 1000W Duschstol

Bruksanvisning – svenska



Läs alltid igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder duschstolen.

Vårdgivaren skall alltid ha tillgång till denna bruksanvisning.

Duschstolen är endast avsedd för professionellt bruk där vårdtagaren är under uppsikt av vårdgivaren.

Användarinstruktioner och rekommenderade underhållsrutiner beskrivs på följande sidor.

Om du har frågor angående användning eller underhåll av din duschstol och inte hittar svaret i denna bruksanvisning, vänligen kontakta oss.

Duschstolen är konstruerad för många års problemfri användning, förutsatt att den används och underhålls på rätt sätt.

Max patientvikt: 200 kg / 440 lbs.



Läs alltid bruksanvisningen

Se alltid till att du har rätt version av manualen och läs användarinstruktionerna innan du använder utrustningen för första gången.



Registrerad hos Läkemedelsverket i Sverige som en MDR-klass 1-produkt enligt MDR 2017/745. TR förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar och/eller förbättringar utan föregående meddelande.

Innehållsförteckning

Tillverkare	Sida 4
Introduktion	Sida 5
Avsedd användning	Sida 6
Avemballering	Sida 7
Kalibrering/initialisering	Sida 7
Säkerhetsinstruktioner	Sida 8
• Allmänna säkerhetsanvisningar	Sida 8
• I händelse av olycka eller tillbud	Sida 8
Funktioner och styrning	Sida 9
Produktbeskrivning	Sida 10
• Allmän produktbeskrivning TR 1000/-W	Sida 10
• Möjlig kombination med annan utrustning	Sida 10
Teknisk specifikation	Sida 11
• Allmänna tekniska specifikationer	Sida 11
• Mått TR 1000/-W i mm	Sida 12
• Mått TR 1000/-W i tum	Sida 13
Användning	Sida 14
• Höjd- och tilt-justering TR 1000/-W	Sida 14
• Nödstopp	Sida 14
• Laddningsinstruktioner	Sida 15
• Batterianvändning	Sida 16
• Armstöd	Sida 17
• Hjul	Sida 17
Patienthantering	Sida 18
• Patienthantering – Från rullstol till duschstol	Sida 18
• Patienthantering – Dusch	Sida 19
• Patienthantering – Toalettbesök	Sida 19

Innehållsförteckning

Produktetikett	Sida 20
Tabell med symboler	Sida 21
Underhållsrutiner	Sida 22
• Före varje användning	Sida 22
• Dagligt underhåll	Sida 22
• Månatligt underhåll	Sida 22
• Årligt underhåll	Sida 23
• Underhåll vart 3:e år	Sida 23
• Underhåll vart 5:e år	Sida 23
Återvinning	Sida 24
Rengöringsinstruktioner	Sida 25
Underhållsprotokoll	Sida 26
Utbildningsprotokoll	Sida 27

Tillverkare



TR Equipment AB
Rundelgatan 2
SE-573 35 Tranås Sverige

Telefon: +46 (0)140 77 00 40
www.trequipment.com
info@trequiment.se

Systerbolag:

USA
TR Group Inc.

Telefon: +1 (800) 7526900
www.trequipment.com information@trequiment.com

Tyskland:
TranspoRehamed GmbH

Telefon: +49 (0) 212-645850-0
www.transporehamed.de info@transporehamed.de

Introduktion

Käre kund,

Tack för att ni har valt en produkt från TR Equipment AB. Vi hoppas att du kommer att trivas med duschstolen TR 1000/-W.

Denna bruksanvisning ska, tillsammans med personalutbildning, säkerställa att operatören/användaren alltid använder och/eller hanterar TR 1000/-W på rätt sätt.

Nya medarbetare måste utbildas av kvalificerad och erfaren personal..

TR Equipment AB kräver att varje användare har läst, förstått och att denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning skall finnas tillgänglig för alla användare. Vi förespråkar att man beställer fler manualer.

Beställ gärna ett nytt exemplar från oss om bruksanvisningen har förkommit eller blivit oanvändbar, eller om den med tiden har blivit oläslig.

Om ni har frågor om produkten, tveka inte att kontakta TR Equipment AB eller någon av våra kvalificerade samarbetspartner.



Läs alltid bruksanvisningen

Se alltid till att du har rätt version av manualen och läs instruktionerna innan du använder utrustningen för första gången.



Varning

- Obligatorisk att läsa bruksanvisningen innan du använder utrustningen.
- Säkerhetsställ att du har läst, förstått och tillämpat informationen på följande sidor innan du använder duschstolen TR 1000.

Avsedd användning:

Duschstol TR 1000/-W

- TR 1000/-W är en batteridrivnen duschstol.
- TR 1000/-W är avsedd att användas inomhus i alla typer av vård- och omsorgsinrättningar samt i privata hem, inklusive hygienutrymmen.
- TR 1000/-W är endast avsett att användas under kortare tid (<60 min) vid kontakt med skadad eller skadad hud.
- TR 1000/-W är INTE avsedd att användas för patienter som väger mer än 200 kg / 440 lb.

Typiska situationer där duschstolen TR 1000/-W används är bland annat:

- Transport av patienten till och från duschutrymmet
- Duschning och rengöring av patienten
- Toalettbesök
- Fotvård
- Den boende måste kunna sitta upprätt utan stöd.
- Den tänkta vårdtagaren är en person som inte kan ta hand om sin personliga hygien.
- Användaren är en vuxen person som kan läsa och förstå bruksanvisningen samt är kvalificerad att ta hand om beroende personer/patienter.



Varning

- Obligatorisk att läsa bruksanvisningen innan du använder utrustningen
- Säkerhetsställ att du har läst, förstått och tillämpat informationen på följande sidor innan du använder duschstolen.

Avemballering

Duschstol TR 1000/-W levereras på en träpall innesluten i en trälåda som är inslagen i plast.

Börja med att utföra avemballeringen av TR 1000/-W genom att skära upp och ta bort plasten. Skruva loss och ta bort trälådan från pallan. Använd INTE några vassa verktyg som kan repa duschstolen.



Lyft försiktigt bort trälådan från pallan. Lyft endast kortvarigt och använd minst två personer.

Ta försiktigt bort TR 1000/-W från pallan.



Varning

När du flyttar TR 1000/-W från pallan krävs två personer

Kalibrering/kalibrering

TR 1000/-W från och med den 1 oktober 2014.

En kalibrering/initialisering ska utföras på lyftpelarna:

- Före första användningen
- Underhåll
- Efter byte av lyftpelare.
- Efter byte av lutningsaktuatören.
- Innan kalibreringsprocessen påbörjas säkerhetsställ att nödknapparna är frigjorda och inte aktiverade.
- Om TR 1000/-W befinner sig i det lägsta läget höjer du stolen genom att trycka på UP-knappen på Handkontroll.
- Tryck samtidigt på kontrollknapparna UP och DOWN på Handkontrollen. Håll kontrollknapparna intryckta.
- Efter 8–10 sekunder börjar lyftpelarna sänka stolen och stolen lutar bakåt. Håll knapparna intryckta under hela processen.
- När TR 1000/-W befinner sig i lägsta läge och stolen är helt lutad bakåt är kalibreringen/initialiseringen avslutad och TR 1000/-W är klar att användas.



Säkerhetsinstruktioner

Allmänna säkerhetsanvisningar

Om du har frågor om användning eller underhåll av din duschstol TR 1000/-W och inte hittar svaret i denna bruksanvisning, kontakta oss gärna!

- Innan du tar TR 1000/-W i bruk säkerhetsställ att alla transportförpackningar och tillbehör har tagits bort, så att ingenting kan fastna mellan sätesramarna och ytorna.
- Testa alla funktioner på TR 1000/-W (höjning, sänkning, lutning, armstöd) före användning.
- Den boende måste placeras bekvämt i duschstolen, med armstöden säkert nedfällda, och säkerhetsbältena ska vara låsta.
- Kontrollera alltid vattentemperaturen manuellt före och under duschen.
- Patienten måste placeras bekvämt på liggplattan, med sidogrindarna ordentligt låsta.
- Säkerhetsställ att alla delar som kommer i kontakt med patienten är hela och saknar vassa kanter.
- Se till att duschstolen kan flyttas, lutas, höjas eller sänkas på ett säkert sätt för att undvika klämskador på den boende.
- Hjulbromsarna på duschstolen måste vara låsta innan en boende flyttas och under tiden som boende.
- Hantera duschstolen försiktigt när du transporterar patienter genom smala korridorer eller över ojämna ytor.
- Undvik hud- eller ögonkontakt med rengöringsmedlet, som är starkt frätande, vid rengöring av TR 1000/-W. Vid kontakt, skölj omedelbart med rikligt med vatten. Om irritation uppstår, kontakta läkare. Läs alltid och följ tvättmedelsleverantörens anvisningar.
- Det batteri som levereras av TR Equipment är det enda som är godkänt för duschstolen.
- Den batteriladdare som levereras av TR Equipment är den enda som är godkänd för batteriet i duschstolen.
- Batteriet får inte laddas i våta eller fuktiga utrymmen – risk för elchock.
- Det rekommenderas att batteriet till duschstolen TR 1000/-W laddas dagligen eller när duschstolen inte används. Batterierna kan inte överladdas.
- Säkerhetsställ att alla hjul är rena, sitter på plats och är oskadade.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och inte är skadade.
- Duschstolen måste inspekteras visuellt för tecken på slitage. Duschstolen ska inte användas om defekter noteras. Omedelbar service krävs.

I händelse av olycka eller tillbud


Notera: Vid en allvarlig incident vid användning av duschstolen TR 1000/-W ska detta anmälas till tillverkaren och till de lokala myndigheterna där du är etablerad.



Varning

- Obligatorisk att läsa bruksanvisningen innan du använder utrustningen
- Endast kvalificerad personal som förstår alla drifts- och säkerhetsrutiner får använda duschstolen.
- Lämna aldrig vårdtagaren utan uppsikt.
- Använd ALDRIG duschstolen TR 1000/-W på något sätt som avviker från de säkerhetsföreskrifter och driftsrutiner som beskrivs i denna bruksanvisning. Duschstolen TR 1000/-W får inte användas av någon förrän användaren har läst och förstått anvisningarna i denna bruksanvisning.

Funktioner och styrning

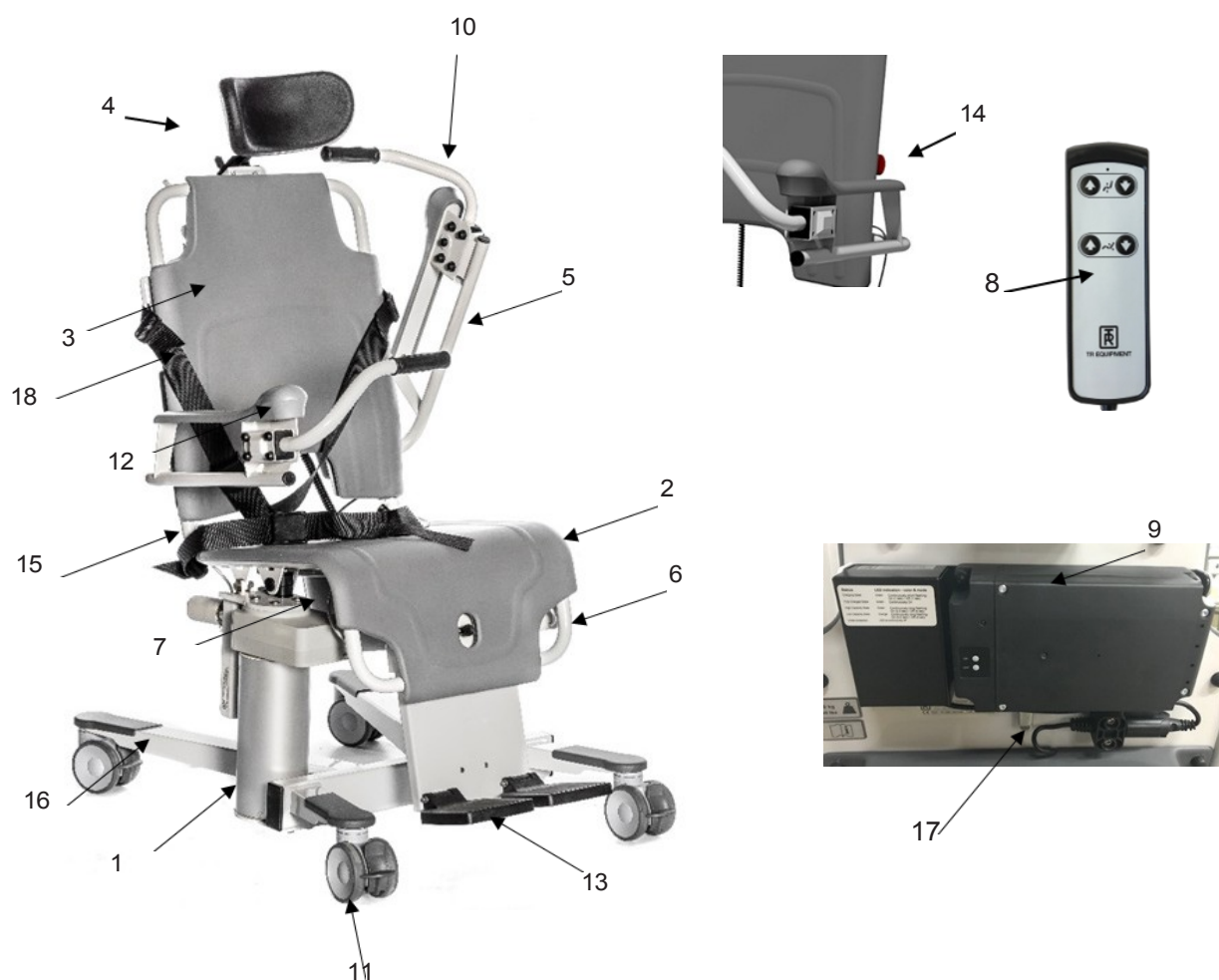

1	Lyftpelare
2	Stolsits
3	Stolens ryggstöd
4	Nackstöd
5	Fällbara armstöd
6	Benstöd
7	Toalettstol inkl. lock (tillval)
8	Handkontroll
9	Batteripaket

10	Framre stängbara armstöd (tillval)
11	Hjul med broms
12	Handtag
13	Fotstöd (tillval)
14	Nödstopp
15	Säkerhetsbälte
16	Chassi-botten
17	Spänne ON/OFF som kan snäppas på och av
18	Brösthälsbälte (tillval)

Produktbeskrivning

TR 1000/-W – Duschstol, batteridrivnen

Duschstol med justerbar höjd och lutning. Som standard utrustad med 4 st. hjul med broms, 2 st. Lyftpelare, 1 st. Lutningsmanöverdon, 1 st. Handkontroll, 1 st. Batteripack, 1 st. Batteriladdare, 2 st. Fällbara armstöd och 1 st. Säkerhetsbälte.



TR 1000/-W
Artikelnummer: 0521000



TR 1000/-W
Med armstöd som kan stängas
fram till Artikelnummer:
0521010

Tillval till TR 1000/-W:

- Toalettskål med lock
- Extra löstagbart batteri
- Väggfäste för batteri

Fabriksmonterat tillval:

- Fällbart och höj- och sänkbart fotstöd
- Rakt styrsats
- Bröstsälte
- Färgade armstöd med stängningsmekanism fram till
- Höjjusteringssats (53 mm högre)

Möjliga utrustningskombinationer	
TR 1000/-W	Duschpanel TR2810



Teknisk specifikation

TR 1000 – Duschstol	
Maximal arbetsbelastning	200 kg / 440 lbs
Styrenhet TR 1000	Handkontroll
Användningsavstånd (sits)	535 – 935 mm / 21" – 37"
Användningsavstånd (säte, inkl. distanssats)	588 – 988 mm / 23" – 39"
Lyftsträcka	400 mm / 16"
Säte, ryggstöd, armstöd	Skummad PUR (polyuretan)
Stomme	Pulverlackerat och förzinkat stål samt rostfritt stål
Skyddsklass	IP X5
Hjul	Dubbelhjul Ø 100 mm

TR 1000 – Mått och vikt	
Längd	860 mm / 63"
Höjd (nackstöd)	1350 – 1750 mm / 53" – 69"
Höjd (nackstöd, inkl. distanssats)	1 403 – 1 803 mm / 55" – 71"
Bredd	700 mm / 27,5"
Vikt TR 1000 (exkl. tillval)	75 kg / 165 lbs

TR 1000-W – Mått och vikt	
Längd	860 mm / 63"
Höjd (nackstöd)	1350 – 1750 mm / 53" – 69"
Höjd (nackstöd, inkl. distanssats)	1 403 – 1 803 mm / 55" – 71"
Bredd	750 mm / 29,5"
Vikt TR 1000/-W (exkl. tillval)	75 kg / 165 lbs


TR 1000 – Spänning	
Batterispänning	24 VDC, 4 Ah (litiumjon, uppladdningsbart)
Batteriladdarens ingång	100–240 VAC, 50/60 Hz
Batteriladdarens utgång	24 V DC

Teknisk livslängd	10 år om produkten sköts och underhålls enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
-------------------	--

Transport och förvaring Omgivningstemperatur	-20 °C – +70 °C -4 °F – +158 °F
---	--------------------------------------


Teknisk specifikation

TR 1000/-W – Duschstol Mått i mm

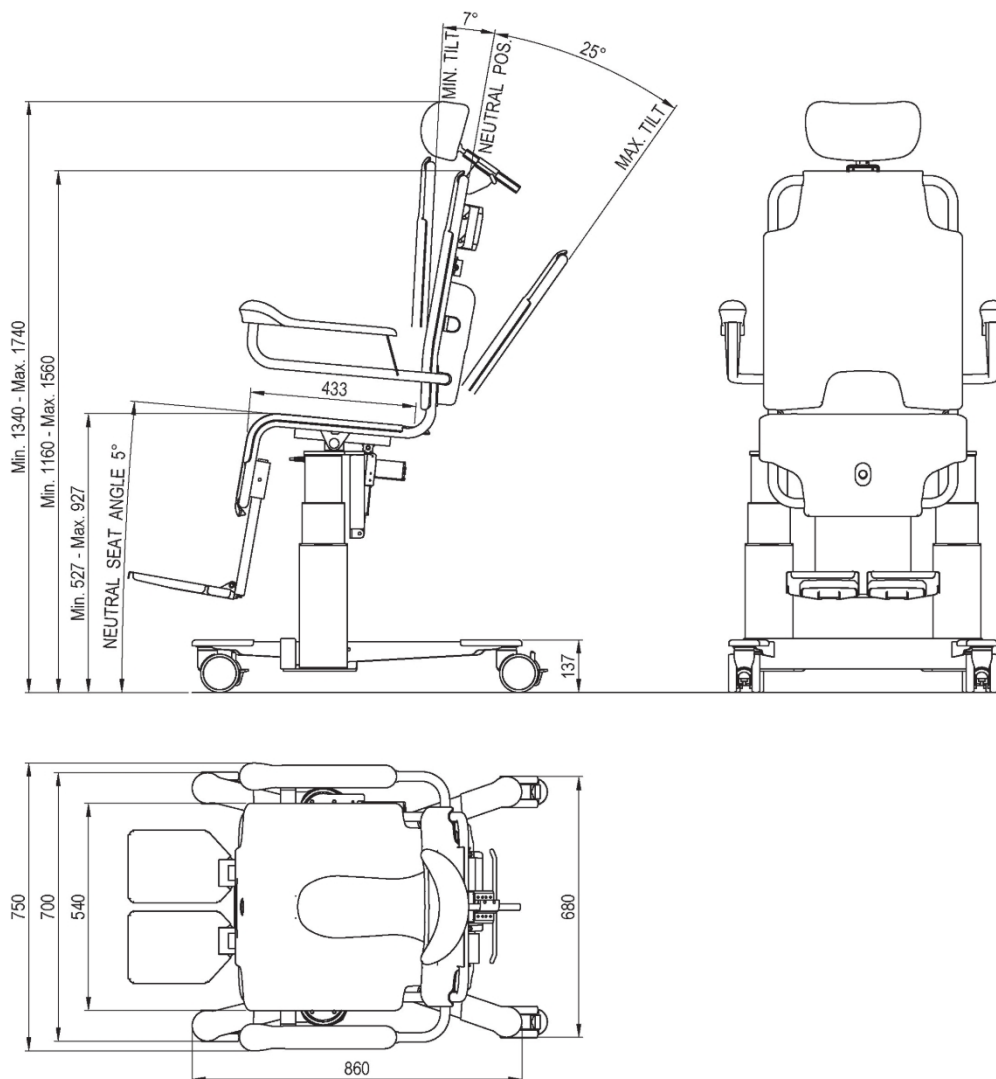

Teknisk specifikation

TR 1000/-W – Duschstol Mått i tum

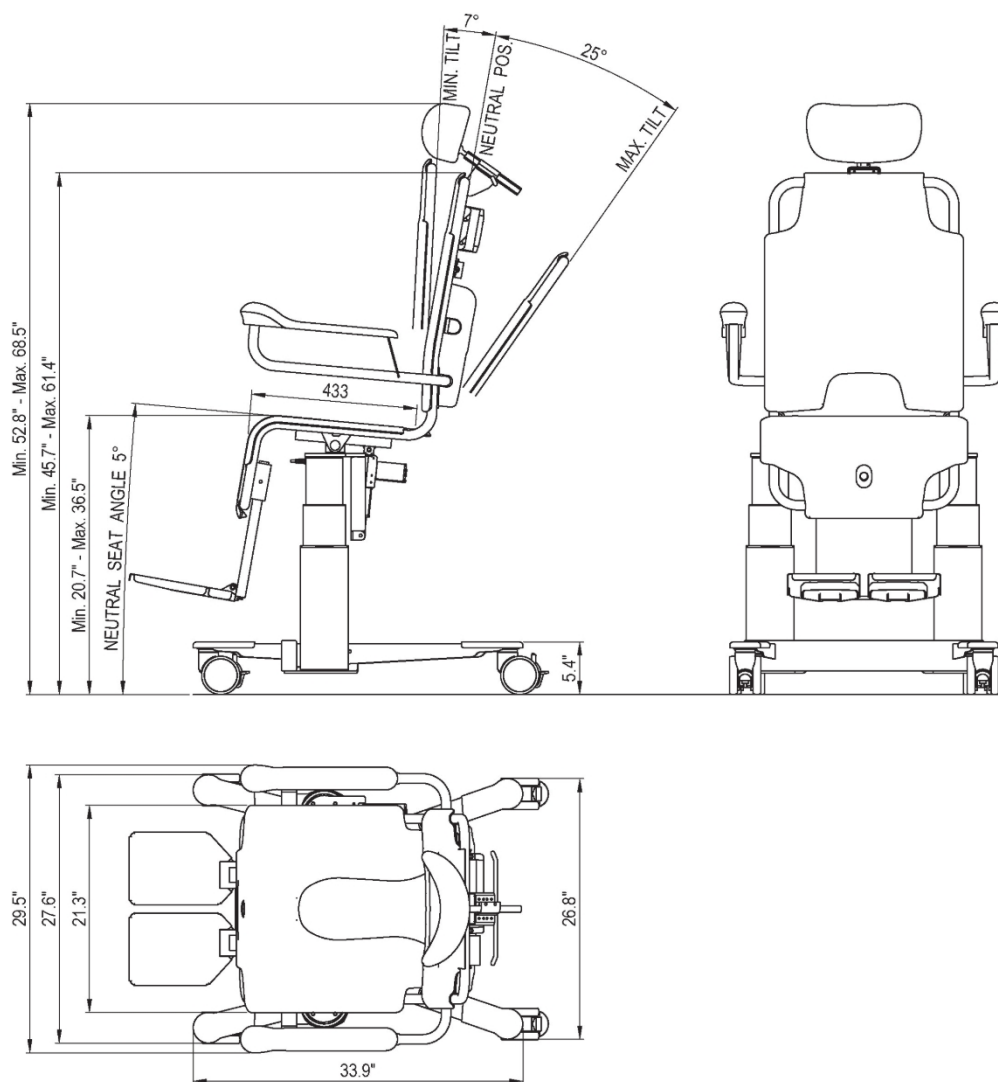

Användning

TR 1000/-W – Höjd- och lutningsjustering Säkra

alltid den boende med säkerhetsbältet. Lutningen

stannar i en neutral position.

Stolen kan lutas framåt för att underlätta förflyttningen med hjälp av samma knapp/symbol.

Detta ska alltid göras när stolen är i sitt lägsta läge.

Höjdjustering
UPP & NER



Tilta
liggplatt
an

TR 1000/-W – Nödstopp

Vid en oväntad händelse kan nödstoppet aktiveras.

- Tryck på den röda knappen för att aktivera Nödstoppet. Lyftpelarna och lutningsmanöverdonet stannar omedelbart.
- Vrid den röda knappen medurs för att avbryta Nödstoppet.



Varning

- Maximal arbetsbelastning = 200 kg/440 lbs


Användning

TR 1000/-W – Laddningsinstruktioner:

Batteriladdaren är endast avsedd för användning inomhus och i torra utrymmen. Batteriladdaren får inte installeras i badrum eller fuktiga utrymmen.

Det rekommenderas att kontrollera batteriets status varje morgon före användning (se LED-indikator – färg och läge).

Batteriets kabelanslutning ska alltid kopplas ur innan batteriet tas ur TR 1000/-W.

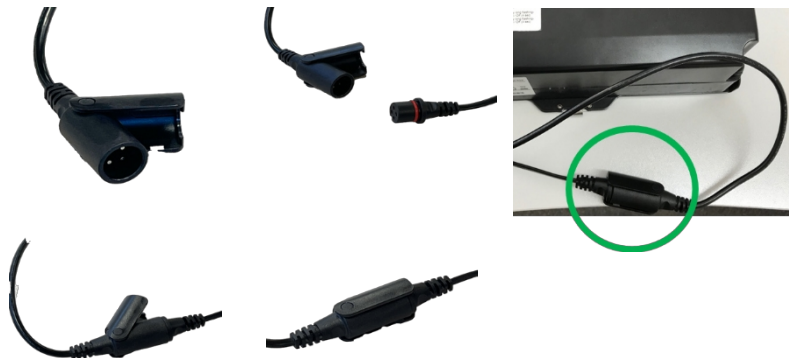

Status	LED-indikator – färg och läge
Fulladdat	Grönt, lyser kontinuerligt
Laddar	Grön Blinkar kort kontinuerligt – ON/OFF (1 sek)
Hög kapacitet	Grön Långt kontinuerligt blinkande – ON/OFF (0,5 sek)/Av (4 sek)
Låg kapacitet	Orange Kontinuerligt långt blinkande – ON/OFF (0,5 sek)/Av (4 sek)
Under skydd	AV
Laddningstid	8 timmar
Från tomt till fulladdat	Batteriet överladdas inte

När du köper en TR 1000/-W med ett löstagbart batteri rekommenderar vi att du köper ett extra batteri. Det extra löstagbara batteriet ska omedelbart sättas på laddning för att göra användningen av TR 1000/-W och laddningsprocessen mer effektiv.

Batterier som förvaras måste laddas för att bibehålla batterikapaciteten.

Batteriet ska laddas i en torr och lättillgänglig miljö.

Det valfria väggfästet ska monteras på en bekväm och lättåtkomlig höjd. Anslut alltid batteriladdaren till batteriet innan du ansluter laddaren till elnätet.



Löstagbart och uppladdningsbart
litiumjonbatteri, 24 V, 4 Ah



Väggfäste, art.nr: 3232622

Användning

Hur länge håller batteriet laddningen?		
Period (inklusive frakt)	Kapacitet	Status
3 månader	79 %	Användbar
6 månader	58 %	Ladda före användning
>6 månader	<58 %	För lång lagringstid, batterikapaciteten har försämrats *Se till att ladda batteriet i 24 timmar var sjätte månad

TR 1000/-W – Rekommendationer för batterianvändning

- Ladda batteriet i minst 24 timmar före första användningen. Om du har köpt ett extra batteri ska du sätta det på laddning när det första batteriet börjar användas.
- Om TR 1000/-W används dagligen ska batteriet laddas dagligen i minst 8 timmar.
- Om TR 1000/-W används sporadiskt under en vecka ska batteriet laddas 1–2 gånger per vecka, dagligen i minst 8 timmar.
- Helst bör batteriet alltid vara anslutet till laddaren när det inte används. Batteripaketet kan inte överladdas.
- Om TR 1000/-W endast används sporadiskt ska batteriet laddas efter varje användning i minst 24 timmar.
- Batterierna kan inte överladdas.
- Om duschstolen ska förvaras ska batteriet laddas tills den ska användas igen, eller så ska batteriet laddas en gång i månaden i minst 24 timmar varje gång.
- Batterier som förvaras utan att laddas varje månad kommer så småningom att förlora sin förmåga att hålla laddningen.
- Laddaren ska anslutas till ett uttag som är utrustat med Jordfelsbrytare.



- Tryck på ON-knappen i 1–2 sekunder för att starta batteriet
- Tryck på OFF-knappen i 3–4 sekunder för att stänga av den.
- När du kopplar bort batteriet och Batteriladdaren från elnätet hörs ett pip och en orange lampa blinkar i några sekunder.
- Du kan endast starta batteriet när det är anslutet till kopplingsboxens anslutning på TR 1000/-W.

Användning

TR 1000/-W – Armstöd

Armstöden kan enkelt fällas upp när du hjälper den boende att sätta sig i och stiga ur stolen. Dra armstödet/armstöden rakt upp till vertikalt läge.

Om TR 1000/-W är utrustad med framstängande armstöd (fabriksmonterade) ska du fälla upp de framstängande armstöden till vertikalt läge innan du fäller upp armstödet/armstöden.

För att sänka och låsa armstöden och de främre stängbara armstöden gör du på motsatt sätt enligt ovan (sänk och fäll in).



TR 1000/-W – Hjul

TR 1000/-W är utrustad med 4 st. hjul med broms.

Hjulbromsarna ska alltid vara aktiverade när:

- En boende flyttas till och från stolen.
- Stolen höjs eller sänks.
- Stolen lutas.
- Man duscht einen boenden.
- Lås hjulen genom att trycka ned den grå pedalen tills du hör ett klick.



Varning

- Lämna aldrig vårdtagaren utan uppsikt.

Viktig

- Hjulbromsen måste alltid vara aktiverad vid förflyttning av den boende till och från TR 1000/-W.

Användning

Patienthantering – Förflyttning från rullstol till duschstol

- Sänk TR 1000/-W till lägsta läge med hjälp av Handkontrollen.
- Lås alla hjul med broms.
- Luta stolen framåt med hjälp av Handkontrollen.
- Fäll upp det fällbara armstödet på överflyttningssidan.
- Placera rullstolen parallellt med duschstolen.
- Låt den boende ta tag i det utfällda armstödet och flytta den boende till duschstolen. Vårdpersonalen måste alltid stödja den boende under förflyttningen.
- Sätt fast den boende med säkerhetsbältena.
- Sänk det uppfällda armstödet och fäll in det främre fällbara armstödet.
- Ta bort rullstolen. Luta och höj TR 1000/-W till en lämplig förflyttningshöjd för både den boende och vårdgivaren.
- Lås upp hjulbromsarna och transportera den boende till hygienutrymmet.
- Efter duschen förflyttar du den boende till rullstolen.
- Gör om procedurerna ovan i omvänd ordning.



Varning

- Lämna aldrig vårdtagaren utan uppsikt.
- Kontrollera alltid vattentemperaturen med handen innan du duschar vårdtagaren.

Viktig

- Hjulbromsen måste alltid vara aktiverad vid förflyttning av den boende till och från TR 1000/-W.

Användning

Patienthantering – Dusch

Den boende måste alltid vara ordentligt fastspänd med säkerhetsbälte(n).

Duschning av den boende:

- Lås hjulbromsarna
- Använd handkontrollen för att höja TR 1000/-W till en bekväm höjd för både den boende och vårdgivaren.
- Använd Handkontrollen för att luta/fälla tillbaka TR 1000/-W till en bekväm vinkel för både den boende och vårdgivaren.
- Dusch och tvätta den boende i detta läge.
- Efter duschen torkar du den boende med en handduk.
- Innan du förflyttar den boende från hygienutrymmet ska du använda Handkontrollen och justera lutningsvinkeln och höjden till ett bekvämt transportläge.
- Rengör och torka av TR 1000/-W efter varje användning.



Patienthantering – Toalettbesök

TR 1000/-W kan användas både över golv- och väggmonterade toaletter.

- Placera TR 1000/-W med användaren över toaletten.
- Använd handkontrollen och justera TR 1000/-W till en lämplig toalett höjd.

Istället för toaletten går det att använda en bäddskål (tillval).

- Fäst bäckenet på TR 1000/-W innan du flyttar den boende för att undvika att denne kläms.



Varning

- Lämna aldrig vårdtagaren utan uppsikt.
- Kontrollera alltid vattentemperaturen med handen innan du duschar vårdtagaren.

Produktetikett



UDI (Unique Device Identification) finns i den läsbara texten i streckkoden. Den innehåller:


- (01) EAN-kod
- Tillverkningsdatum. Datumformatet är ÅÅÅÅMMDD, där Y = år, M = månad och D = dag.
- Serienummer visas som en sexsiffrig kod.

	2023-11-21		0521000-US		100163
	TR Equipment AB, Rundelgalan 2, SE-573 35 Tranås Sweden	Phone: +46 (0) 140 385060			
UK-Rep	TR Equipment UK Ltd., Innovation Centre, Warwick CV34 6UW, UK	Phone: +44 (0) 8443358386			
CH-Rep	Siotec AG, Sägestrasse 75, CH-3098 Köniz, Schweiz	Phone: +41 (0) 31 970 01 70			



Produktetikett

Tabell med symboler

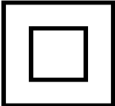 TR EQUIPMENT	TR Equipment-Logotyp		Visuell inspektion
	Produkten följer krav i det medicintekniska regelverket 2017/745 (MDR)		Läs användarinstruktionerna
	CE-märkning		Maximal patientvikt 200 kg
	Tillverkningsdatum		WEEE-symbol Kan inte kasseras som hushållsavfall
	Bolagsadress		Storbritannien
	Artikelnummer		Se bruksanvisningen (IFU)
	Serienummer		Symbol på batteriladdaren: Klass II, dubbelisolerad
Status Charging State: Green, Continuously short flashing: On (1 sec) / Off (1 sec) Fully Charged State: Green, Continuously On High Capacity State: Green, Continuously long flashing: On (0.5 sec) / Off (4 sec) Low Capacity State: Orange, Continuously long flashing: On (0.5 sec) / Off (4 sec) Under protection: LED is continuously off	Batterietikett. Laddningsinformation.		

Underhållsrutiner

Den rekommenderade frekvensen för dessa underhållsrutiner beror på hur ofta utrustningen används. Det är god praxis att fastställa dessa rutiner och sedan anpassa frekvensen efter de förhållanden som råder.

Före varje användning

Gör en visuell inspektion av duschstolen TR 1000/-W:

- Säkerhetsställ att den står stadigt på golvet.
- Säkerhetsställ att det går att höja och sänka duschstolen.
- Säkerhetsställ att duschstolen inte har några skador som kan skada patienten.

Dagligt underhåll:

- Rengör duschstolen enligt rengöringsinstruktionerna. Se innehållsförteckningen, "Rengöringsinstruktioner".
- Ladda batteriet varje dag eller när duschstolen inte används.
- Om lyftpelarna utsätts för avföring eller annan aggressiv smuts ska du omedelbart rengöra lyftpelarna innan du höjer eller sänker duschstolen.

Månatligt underhåll:

- Säkerhetsställ att alla skruvar och fästdon är ordentligt åtdragna.
- Det är viktigt att alla skruvar och fästdon kontrolleras och dras åt vid behov – även de som inte syns så lätt.
- Kontrollera armstöden för att säkerställa att de är i gott skick och att alla fästelement sitter på plats och fungerar fullt ut.
- Kontrollera hjulen och säkerställ att de är rena och att bromsarna fungerar som de ska.
- Kontrollera Tiltfunktionen och säkerhetsställ att den fungerar som den ska.
- Kontrollera lyftpelarna och säkerhetsställ att de fungerar som de ska.
- Om nödvändigt, initialisera/kalibrera TR 1000/-W.

Upprepa före varje användning, Dagligt underhåll och Månatligt underhåll.

- Initiera/kalibrera TR 1000/-W.
- Kontrollera att handkontrollen är i ordning och utan skador.
- Kontrollera att alla synliga kablar är i gott skick och inte är skadade.
- Kontrollera att nödstoppet fungerar.
- Kontrollera att nackstödet är i gott skick, utan skador och fullt funktionsdugligt.
- Kontrollera att alla ytor på sätet är i gott skick och utan skador.
- Kontrollera att armstöden är i gott skick, utan skador och fullt fungerande.
- Ta bort plastskyddet på ryggstödet och utföra rengöring vid behov.



Varning

- Underhåll och/eller reparationer får endast utföras av Tillverkaren eller av kvalificerad personal som auktoriserats av Tillverkaren, annars upphör garantin att gälla omedelbart.

Viktigt:

- Duschstolen ska omedelbart tas ur bruk om defekter eller avvikelser upptäcks. Omedelbar service krävs.

Underhållsrutiner

Årligt underhåll

Det rekommenderas att man vänder sig till en auktoriserad service-/underhållstekniker för att utföra en årlig inspektion av duschstolen.

Underhållsrekommendationerna för underhåll vart 3:e år, vart 5:e år och vart 10:e år baseras på användning inom hemvård och offentlig användning enligt SS-ISO 17966:2016.

Om din TR 1000/-W ska användas på en institution, kontakta TR Equipment för ett anpassat underhållsschema.

Underhåll vart 3:e år

- Upprepa före varje användning samt vid det dagliga, månatliga och årliga underhållet.

Byt ut följande delar:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| • Batteri | Artikelnr: 200110 |
| • Säkerhetsbälten (2 delar) | Art.nr: 7418320-02 och -03 |

Underhåll Vart 5:e år

- Upprepa före varje användning, dagligt underhåll, månatligt underhåll och årligt underhåll.
- Kontrollera sätets och ryggstödet skick

Byt ut följande delar:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| • Hjul med broms | Art.nr: 851760 |
| • Byt ut Handkontrollen | Art.nr: 851899 |

Om TR 1000/-W används dagligen rekommenderar vi utbyte av följande komponenter:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| • Lyftpelare | Art.nr: 851895-02 |
| • Luta-ställdon | Art.nr: 851896 |



Varning

- Underhåll och/eller reparationer får endast utföras av Tillverkaren eller av kvalificerad personal som auktoriserats av Tillverkaren, annars upphör garantin att gälla omedelbart.

Viktig:

- Duschstolen ska omedelbart tas ur bruk om defekter eller avvikelser noteras. Omedelbar service krävs.

Avfallshantering / Återvinning

Återvinning av utrustningen

- Sits och ryggstöd av PUR ska återvinnas som brännbart material.
- Metaldelar ska återvinnas i metallåtervinningen
- Det grå överdraget och stänkskyddet är tillverkade av ABS-plast och ska utgöra material för återvinning.
- Hjulen är tillverkade av polyuretan och ska återvinnas som brännbart material.
- Bultar ska återvinnas som metalleder.
- Chassi-delar och fästelement ska återvinnas som metallmaterial.
- Lyftpelare, Handkontroll, styrbox, kopplingsbox och kretskort ska återvinnas som elektriskt och elektroniskt material.



Viktig:

- När batterierna byts ut ska de lämnas in i enlighet med nationella bestämmelser.
- När du utbyter elektriska och elektroniska delar/komponenter ska du lämna in delar/komponenter i enlighet med nationella bestämmelser.



Återvinning av förpackningsmaterial.

- Förpackningsmaterialet består av plast och en träpall.
- Plasten ska återvinnas som plastmaterial och träpallen ska återvinnas som trämaterial.

Rengöringsinstruktioner

- Välj rengöringsintervall utifrån graden av nedsmutsning.
- Föroreningar bör avlägsnas så snart som möjligt för att förhindra skador på materialet.
- Rengör inte produkten med verktyg som kan skada ytorna. Använd en handduk, svamp eller en mjuk borste.
- Förvara duschstolen endast i torrt tillstånd.
- Använd ett naturligt, svagt alkaliskt rengöringsmedel som inte innehåller några lösningsmedel.
- Använd inte produkter som trikloretylen, eftersom de skadar ytan på sits och ryggstöd.
- Använd inte jobbaserade desinfektionsmedel, eftersom detta kan missfärga ytan på sits och ryggstöd.
- Använd inte vatten som är varmare än 45 °C / 113 °F
- Undvik kraftig friktion och slipande rengöringsmedel vid rengöring, eftersom detta kan skada duschstolens ytor.
- Använd en bomullspinne för att rengöra hålena för avloppet under pelarna.

Rengöringsprocedur för PUR-sits och ryggstöd.

- Borsta först bort lösa smutspartiklar och skölj sedan av materialet med rent vatten.
- Spraya på rengöringsmedlet i angiven koncentration eller applicera det med en ren handduk. Dosera mängden rengöringsmedel efter hur smutsigt det är.
- Låt rengöringsmedlet verka i 2–5 minuter och torka sedan av med en handduk.
- Skölj bort smuts och rester av rengöringsmedlet noggrant med kallt eller ljummet vatten för att förhindra missfärgning av materialet.
- Förvara duschstolen endast när den är ren och helt torr.

Allmänna riktlinjer för val av rengöringsmedel för rengöring

- Icke-slipande rengöringsmedel
- Klorlösning med mindre än 5 viktprocent klor
- Alkohollösning med mindre än 3 viktprocent



Varning

- Använd aldrig lösningsmedelsbaserade eller starkt alkaliska vätskor för rengöring, eftersom dessa kan skada eller ge fläckar på madrass- och kuddytorna.
- Torka av duschstolen så att vatten inte droppar på golvet.
- Låt inte duschstolen torka i solljus eller nära en värmekälla. Detta kan orsaka missfärgning. Undvik skador på grund av överhettning.

Viktig

- Användaren/operatören ansvarar för att välja rätt rengöringsmedel och tillsatser enligt lokala föreskrifter och säkerhetsstandarder. Läs bruksanvisningen från tillverkaren av rengöringsmedlet och kontrollera om produkten är lämplig för användning med denna produkt.

Underhållsprotokoll

Tack för att du läser detta dokument.

Om du har frågor om drift eller underhåll av din utrustning och inte hittar svaret i denna handbok, tveka inte att kontakta oss!