



TR 1700

Elektriskt höj - och sänkbart badkar

Hygiene Equipment
Designed for People

TR 1700 Utrymmessparande badkar

TR 1700 är speciellt utformad för att optimera mindre utrymmen utan att offra funktion och effektivitet. Perfekt för sjukhus, äldreboenden och privata hem som har begränsat utrymme och kräver ett fullt fungerande badkar. Badet höjs och sänks för att hitta den ideala arbetshöjden för vårdgivaren, vilket minskar tunga lyft och böjningar, trötthet och risk för ryggskador. Markfrigång under badkaret tillåter användning av många olika typer av patientlyftar och enkel golvrengöring.



Registrerad hos Läkemedelsverket som Klass 1-produkt i enlighet med MDR 2017/745.

TR Equipment förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller tillägg i bruksanvisningen.



Specifikationer

Längd:	1 685 mm
Bredd:	695 mm
Höjd:	660 - 960 mm
Lyfthastighet:	16 mm/s
Max. patientvikt:	150 kg
Strömförsörjning:	230 V, 50 Hz, 10 A
Vikt (tomt):	70 kg
Tillval:	Kan levereras utan termostad och duschhandtag.



TR EQUIPMENT




TR 1700

Elektriskt höj- och sänkbart badkar

Hygiene Equipment
Designed for People

Funktioner

- TR 1700 höjs tyst och snabbt. Handkontrollen för höjning och sänkning kan manövreras från båda sidor om badkaret.
- Öppnas och stängs genom att vrida på bräddavloppet. Inga händer behöver vara i vattnet.
- Den fabriksmonterade termostatiske mixern reglerar både badkarspåfyllningen och duschvattentemperaturen.
- Duschhandtaget har ett utloppsmunstycke i mjukt gummi, som är lätt att rengöra och ger en bekväm mjuk vattenspridning.
- Badkaret är tillverkat av glasfiberarmerad plast och stommen och kjolarna är gjorda av pulverlackerat stål.
- Avloppet kan fästas på golvet eller på väggen.
- Justerbara fötter för ökad säkerhet och komfort på ojämna golvytor.
- Olika färgalternativ tillgängliga på sidopaneler och fötter för att passa individuell design.

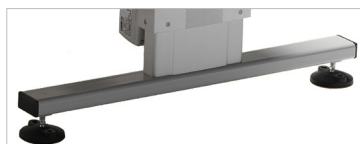

TR 1700 har justerbara fötter för ökad säkerhet och komfort på ojämna golvytor.



TR 1700 levereras med termostatisk mixer som reglerar både badkarspåfyllningen och duschvattentemperaturen.



Höjjusteringen av TR 1700 styrs av en handkontroll som kan manövreras från båda sidor om badkaret.



För ytterligare information angående anpassade färger, kontakta din TR-distributör. Du kan välja vilken RAL-färg du vill.


Applikationsexempel

Integrerad med TR 9650 mobila stolslift, erhålls en säker förflyttning och säkert utförande under hela badprocessen för både användaren och vårdgivaren. Användaren lämnar inte stolen under hela badprocessen.



Art. nr.	Modell
05191700	TR 1700 Badkar utan termostatisk blandare
05191701	TR 1700 Badkar med termostatisk blandare

Dimensioner (mm)

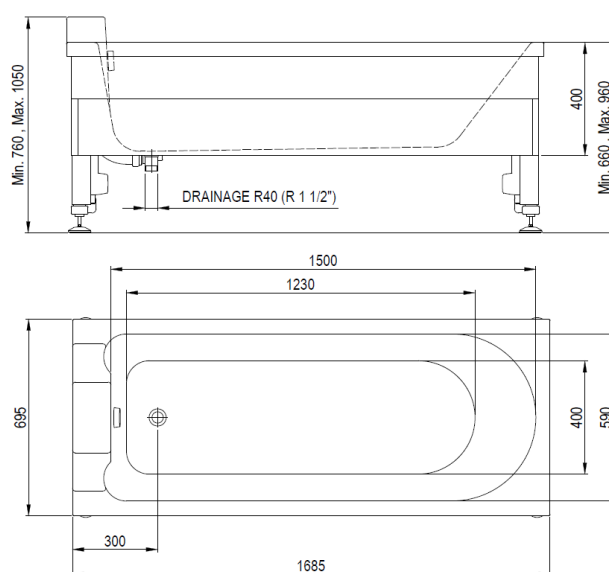

Huvudkontor

TR Equipment AB, Sweden
Telefon: +46 140 38 50 60
E-post: info@trequipment.se
www.trequipment.com

Dotterbolag

TR Group Inc, US, Telefon: +1 (800) 752 6900
TRanspoRehaMed GmbH, Germany, Telefon: +49 (0) 212 645850-0



TR EQUIPMENT